

Soluciones para
el Cuidado de la Piel

3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor

Película protectora que forma una barrera contra adhesivos, humedad y fricción o roce.

Al disminuir la fricción
(componente del cizallamiento),
ayuda a reducir el riesgo de
Lesiones o Úlceras por Presión (LP
o UPP).



Usos clínicos

Prevención de lesiones cutáneas:

- ✓ Asociadas a la humedad (MASD): periestomales, perilesionales, alrededor de tubos o drenajes, intertrigo, Dermatitis Asociada a Incontinencia (DAI) y Dermatitis Irritativa del Pañal (DIP)
- ✓ Por adhesivos de uso sanitario (MARSI)
- ✓ Por fricción o roce; ayuda a disminuir el riesgo de lesiones por presión

Frecuencia de uso recomendada

Uso	Frecuencia de aplicación
Prevención de lesiones de piel asociadas a la humedad (MASD)	Cada 12 a 24 horas en pacientes de alto riesgo y cada 72 horas en pacientes de bajo riesgo asociado a MASD
Prevención de lesiones por adhesivos	Antes de aplicar el producto adhesivo
Prevención de lesiones por fricción o roce	Cada 72 horas



Características del producto

- ✓ Forma una capa protectora respirable y flexible, que permite visualizar la piel gracias a su tecnología de polímeros que contiene un plastificante
- ✓ Permite la adhesión de apósitos y cintas, y protege la piel del daño por adhesivos de uso sanitario (MARSI)
- ✓ Protege la piel de la humedad y agentes irritantes como orina, deposiciones líquidas, saliva, sudor y exudado de heridas
- ✓ Previene el daño por roce y fricción, ayudando a disminuir el riesgo de Lesiones o Úlceras por Presión (LP o UPP).
- ✓ Puede ser aplicada sobre piel intacta o irritada
- ✓ Costo-efectivo: resiste hasta por 72 horas y no necesita ser removida
- ✓ Libre de fragancia y látex, no produce ardor, no es tóxica ni interfiere con el proceso de cicatrización
- ✓ Se seca en aproximadamente 30 segundos
- ✓ No interfiere con la capacidad de absorción de apósitos o pañales
- ✓ Compatible con gluconato de clorhexidina

Instrucciones de aplicación

Prevención de lesiones por humedad

1. Si es necesario, limpie la zona afectada con un limpiador cutáneo de pH ácido o neutro, según protocolo institucional, y seque la piel sin friccionar
2. Aplique un puff de 3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor en spray, de manera uniforme, a 10 o 12 cm de distancia de la piel*
3. Deje secar por 20 a 30 segundos
4. Para mayor protección de la piel, aplique un segundo puff (no aplique más de dos capas)
5. Al aplicar el producto sobre pliegues cutáneos, sostenga la piel hasta que el producto se seque completamente**

* La piel debe estar libre de protectores cutáneos u otras cremas, aceites, ungüentos o pastas antes de la aplicación del producto.

** Sobre el producto no se recomienda aplicar protectores cutáneos u otras cremas, aceites, ungüentos o pastas.

Prevención de daño por adhesivo

Protección de piel alrededor de un catéter vascular

1. Realice la curación del sitio de inserción del catéter de acuerdo con los protocolos de su institución y deje secar completamente el producto antiséptico
2. Aplique el hisopo estéril de 1 ml, evitando el área inmediata alrededor del sitio de inserción
3. Deje secar por 30 segundos
4. Coloque el apósito correspondiente

* Si está utilizando el Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ CHG para el aseguramiento del sitio I.V. con Gluconato de Clorhexidina, sugerimos dejar libre de película protectora la zona donde quedará la almohadilla de clorhexidina.

Protección de la piel alrededor de una herida

1. Realice la curación y limpie la piel alrededor de la herida.
2. Seque la piel sin friccionar
3. Aplique 3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor alrededor de la herida y deje secar por 30 segundos
4. Cubra la herida según el protocolo de su institución

Información de pedido

Código	Descripción	Empaque
3343E	3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor Hisopo de 1 ml	25 unidades /cajita 4 cajitas /caja
3346E	3M™ Cavilon™ Película Protectora Sin Ardor Spray de 28 ml	12 unidades /caja



División de Soluciones para el
Cuidado Crítico y Crónico

3M Cuidado de la Salud
2510 Conway Avenue
St Paul, MN 55144 USA
1-800-228-3957
3M.com/Cavilon

3M, Cavilon y Tegaderm son marcas comerciales de 3M.
Por favor recicle. © 3M, 2018. Todos los derechos
reservados.
70-2011-7104-1